

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ РБ
Стоматологическая поликлиника №6 г.Уфа
С. В. Викторов
_____ 2020 г.



Алгоритм дезинфекции маски тканевой многократного применения

1. После использования маски тканевой многократного применения в течении 2 часов необходимо провести дезинфекцию в месте первичного сбора (непосредственно в лечебном кабинете) в контейнере для дезинфекции медицинских отходов класса «Б» (режим белье нательное, одежда персонала) с применением дезинфицирующего средства Триосепт Люкс 1% время экспозиции 30 минут.
2. По истечении времени экспозиции необходимо тщательно промыть маску под проточной водой в течении 3 минут, затем высушить в специально отведенном месте на сушилке.
3. Заведующая хозяйством упаковывает и отправляет в стирку, согласно договора.
4. После стирки маску необходимо простерилизовать паровым методом в паровом стерилизаторе при температуре 134 градуса в течение 5 минут в пакете для стерилизации.

Обоснование:

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность СанПин 2.1.3.2630-10.
- МУ 3.5.736-99.3.5 Дезинфектология обработки белья в медицинских учреждениях.
- МР 287-113 от 30.12.1998

Главная медицинская сестра

Э. Р. Бакирова